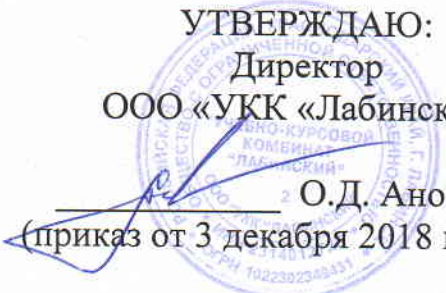


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УЧЕБНО - КУРСОВОЙ КОМБИНАТ «ЛАБИНСКИЙ»

СОГЛАСОВАНО:
Педагогическим советом
ООО «УКК «Лабинский»

(протокол от 3 декабря 2018г. №10)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «УКК «Лабинский»


О.Д. Аноприева
(приказ от 3 декабря 2018 г. №16 от)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА:

**«ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
МЕДИЦИНСКИХ ПАРОВЫХ СТЕРИЛИЗАТОРОВ»**

г. Лабинск
2018 г.

РАЗДЕЛ I

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение персонала по обслуживанию медицинских паровых стерилизаторов» (далее «Программа») разработана на основании требований Приказа Минздрава СССР от 10 ноября 1991 года № 287 «Стерилизаторы медицинские паровые. Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах».

Целью реализации Программы является приобретение знаний, умений и навыков обслуживания медицинских паровых стерилизаторов в объеме требований Приказа Минздрава СССР «Стерилизаторы медицинские паровые. Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах».

Программа соответствует требованиям:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

В содержание Программы входят требования:

- Приказа Минздрава СССР от 10 ноября 1991 года № 287 «Стерилизаторы медицинские паровые. Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» ОМУ 42-21-35-9;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 года N 116.

Срок обучения: 64 часа.

Форма обучения: очно-заочная.

Режим занятий: по 1-8 часов в день, 1-6 учебных дня в неделю.

К освоению Программы допускаются лица, имеющие уровень образования не ниже основного общего образования.

Обучение включает аудиторные (теоретические) и внеаудиторные (самостоятельные, практические) занятия.

Теоретические занятия направлены на изучение правил эксплуатации медицинского парового стерилизатора и соблюдение правил безопасности при работе с ним.

Самостоятельные занятия (самостоятельная работа) предназначены для повторения учебного материала и закрепления полученных знаний.

Для выполнения самостоятельной работы каждый обучающийся обеспечивается соответствующим комплектом учебного материала.

Для освоения и выработки умений и навыков обслуживания медицинских паровых стерилизаторов Программой предусмотрены практические занятия на рабочих местах в организации работодателя.

Обучение завершается итоговой аттестацией. Обучающийся, успешно прошедший итоговую аттестацию, решением аттестационной комиссии допускается в качестве персонала к обслуживанию медицинских паровых стерилизаторов.

На основании решения аттестационной комиссии обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об обучении (удостоверение установленного образца).

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Лицевая сторона удостоверения:

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовой комбинат «Лабинский»	
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____	
ФОТО	Выдано _____ _____
в том, что он (она) с « » 20____ г. по « » 20__ г. обучался в ООО «УКК «Лабинский» по программе «Обучение персонала по обслуживанию медицинских паровых стерилизаторов»	

Оборотная сторона удостоверения:

Решением аттестационной комиссии _____ _____	
допускается в качестве персонала к обслуживанию медицинских паровых стерилизаторов	
Основание: протокол № ___ от _____ 20__ г.	
Председатель аттестационной комиссии	
Директор учебно-курсового комбината	
М.П.	« » 20____ г.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения Программы является приобретение знаний, умений и навыков обслуживания медицинских паровых стерилизаторов в объеме требований Приказа Минздрава СССР «Стерилизаторы медицинские паровые. Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» ОМУ 42-21-35-91.

В результате освоения Программы обучающийся должен знать:

- основные понятия о процессе стерилизации;
- принцип устройства и технические характеристики паровых стерилизаторов;
- правила эксплуатации паровых стерилизаторов, в том числе паровых стерилизаторов горизонтального типа, круглых вертикальных стерилизаторов, прямоугольных паровых стерилизаторов, паровых стерилизаторов зарубежного производства;
- обязанности персонала при обслуживании паровых стерилизаторов;
- меры безопасности при работе на паровых стерилизаторах;
- порядок действий персонала при аварийных ситуациях;
- правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате освоения Программы обучающийся должен уметь:

- осуществлять подготовку к пуску, пуск и остановку парового стерилизатора;
- осуществлять заданный режим работы парового стерилизатора;
- вести наблюдение за исправным состоянием парового стерилизатора во время работы;
- проводить обслуживание запорной и запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, установленных на паровом стерилизаторе;
- осуществлять остановку парового стерилизатора в аварийных ситуациях;
- оформлять соответствующую документацию на рабочем месте.

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка достижения планируемых результатов освоения Программы определяет степень соответствия знаний, умений обучающихся основным знаниям, умениям, установленным Планируемыми результатами освоения обучающимися Программы.

Достижение планируемых результатов освоения Программы осуществляется на основе контроля за соответствием организации и осуществления учебного процесса установленным требованиям к порядку и условиям реализации Программы.

Для определения уровня освоения обучающимися определенных Программой знаний используются результаты итоговой аттестации обучающихся.

РАЗДЕЛ II

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план Программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность разделов и иных видов учебной деятельности, формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (таблица 1).

Таблица 1 – УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов и иных видов учебной деятельности	Трудоёмкость (часов)	В том числе			Форма промежуточной и итоговой аттестации
			теоретические занятия	самостоятельная работа	практические занятия	
1	Порядок обслуживания медицинских паровых стерилизаторов	32	16	16	-	зачет
2	Изучение конструкций паровых стерилизаторов, ознакомление с его работой	30	-	-	30	-
3	Итоговая аттестация	2	2	-	-	экзамен
	Итого	64	18	16	30	